

bathmate®

J U S T A D D W A T E R

Бренд bathmate (басмэйт)

- ▣ Страна производитель: **Великобритания**
- ▣ Первые продажи в **Европе и Великобритании**
- ▣ Бренд представлен в **90 странах по всему миру**
- ▣ У нас покупают **более 20.000 помп ежемесячно**
- ▣ Мы участвуем во **всех мировых выставках**

bathmate[®]
J U S T A D D W A T E R



- ▣ Изобретатель гидропомпы **Джон Оукс >**

История создания бренда

- ▣ Изобретатель гидропомпы: **Джон Оукс**
- ▣ Создание бренда: **2006 год**
- ▣ Первая гидропомпа: **HERCULES** (сейчас Hydro7)



bathmate®
J U S T A D D W A T E R

«Мой хороший друг, заядлый спортсмен и мотоциклист, получил серьезную травму позвоночника, из-за которой он больше не мог достигать и поддерживать эрекцию»

«Чтобы попытаться помочь ему, я изучил ассортимент обычных помп для пениса, представленных на рынке. Некоторые из них были довольно хороши, хотя я не был полностью убежден в этом и будучи инженером-конструктором в области машиностроения, решил, что должен быть более совершенный способ создания вакуумной технологии. За эти годы я проделал большую работу в области гидравлики и посмотрел на помпу для пениса под новым углом»




Изменение дизайна в 2024 году

- ▣ Логотип становится однотонным

- ▣ Внешний вид коробки изменён

HERCULES (сейчас Hydro7):

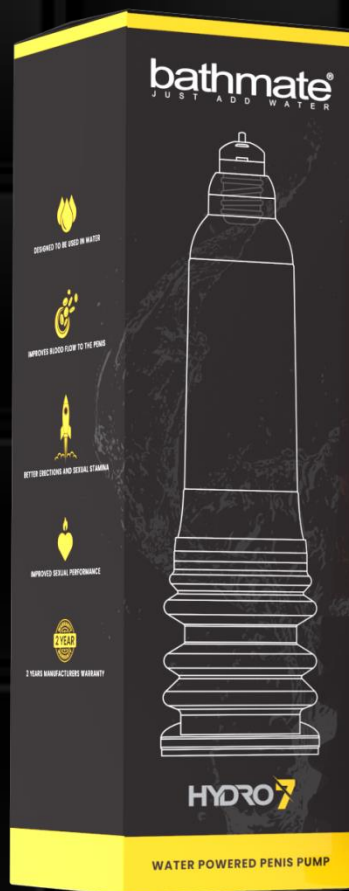



bathmate®
JUST ADD WATER



Причины купить/использовать гидropomпу:

- ▣ **Здоровье.** Профилактика застойных явлений в малом тазу, профилактика простатита
- ▣ **Эрекция.** Повышение либидо, более частые спонтанные эрекции, улучшение качества эрекции, твёрдость и выносливость
- ▣ **Уверенность.** Психотерапевтический эффект и восстановление сексуально окрашенных ощущений, которые затем реализуются в половой жизни. Передача нервных импульсов в спинномозговой центр эрекции и эякуляции СТОСН (Синдром Тревожного Ожидания Сексуальной Неудачи). Более яркие психо-эмоциональные переживания во время оргазма, некоторые отмечают более обильную эякуляцию
- ▣ **Чувствительность.** Больше наслаждение во время секса. Некоторые мужчины отмечают повышение чувствительности головки ПЧ, иногда отмечается продление полового акта (зависит от физиологии)
- ▣ **Размер ПЧ.** Согласно опросу проведённому на нашем сайте в 2018, более 85% пользователей из 155 респондентов сообщили о реальных результатах после применения гидropомпы bathmate

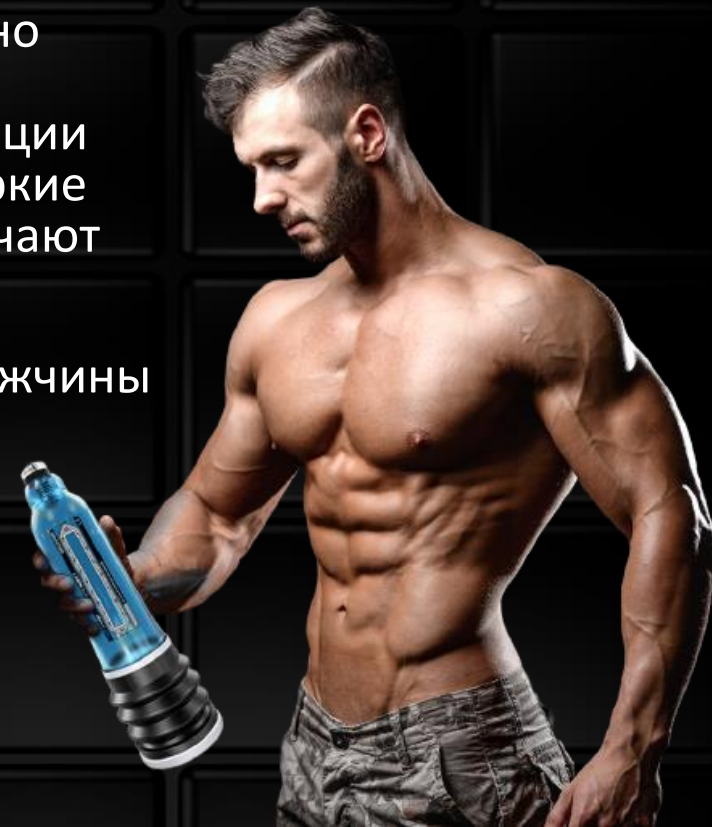


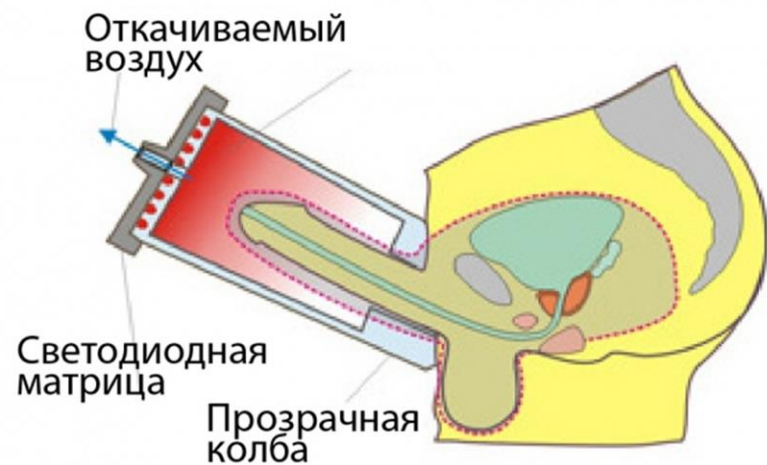

Условные обозначения:




- Зона усиленного кровотока и лимфотока в области органов и мышц малого таза

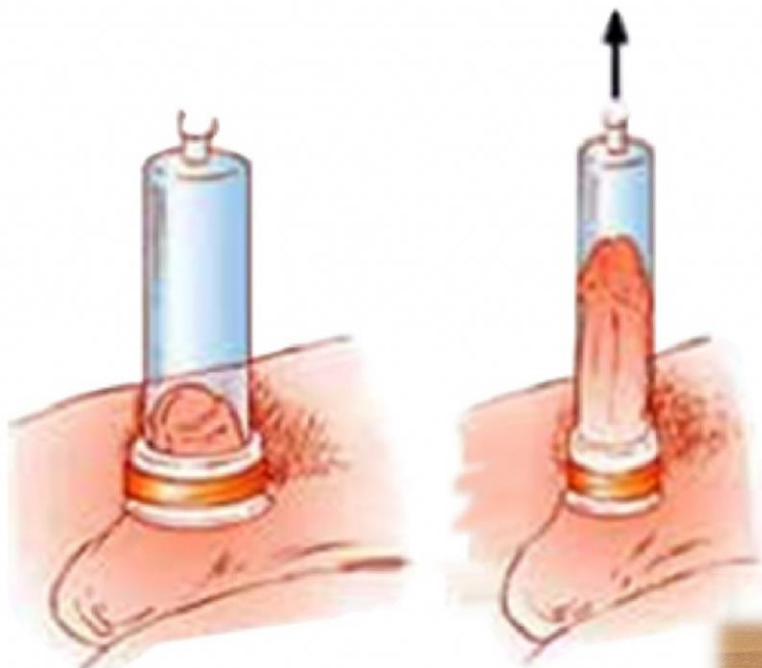

ЛОД-терапия

(Локальное Отрицательное Давление)

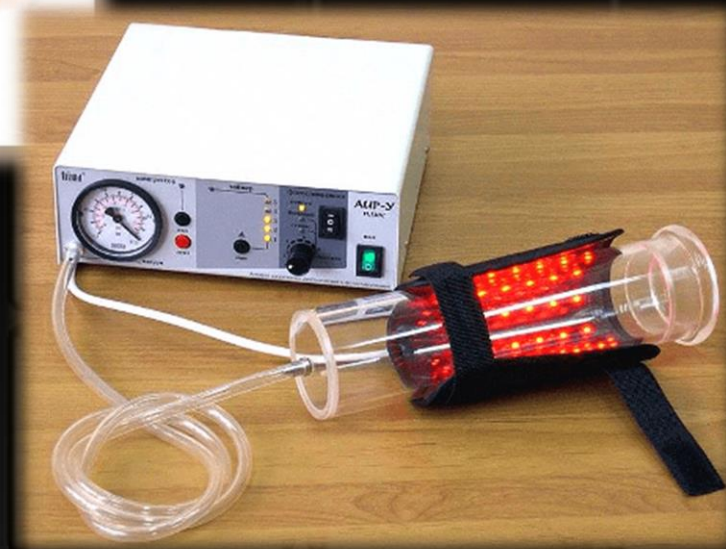

Воздух vs Вода



- **Плотность**

более мощное и равномерное давление
безопасность использования
меньше отеков и травмирования

- **Увлажнение** (условно)

защита от травмирования
не нужна дополнительная смазка



- **Теплопроводность**

расширение пещеристых тел
разогрев тканей
прилив крови




ШАГ 1. Правильное измерение ПЧ

- ▣ Достичь максимальной эрекции
- ▣ Измерить длину ПЧ от основания до конца головки (например 15см)
- ▣ Измерить обхват ПЧ (не диаметр!) с помощью гибкой линейки или шнура оборачиваем вокруг самой толстой части пениса и затем прикладываем на измерительную линейку (например 15,2)
- ▣ Диаметр = обхват : число ПИ (π 3,14)
Например: $15,2 : 3,14 = 4,84$ см

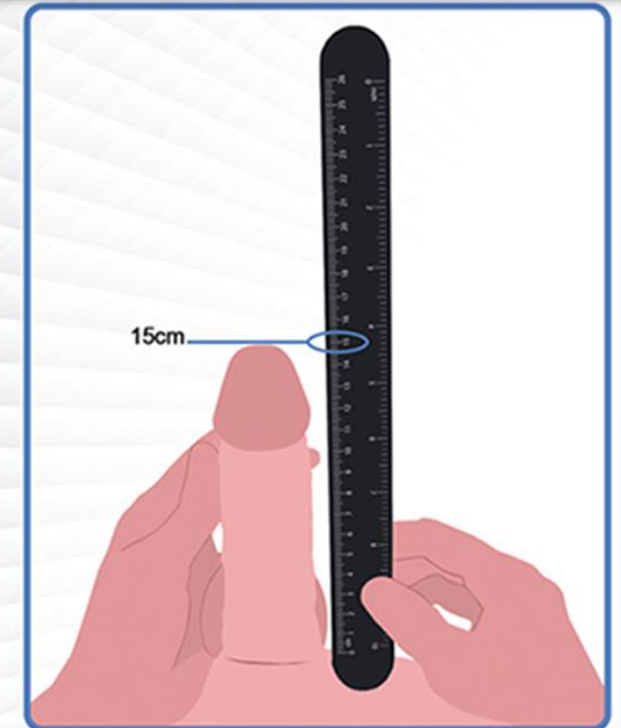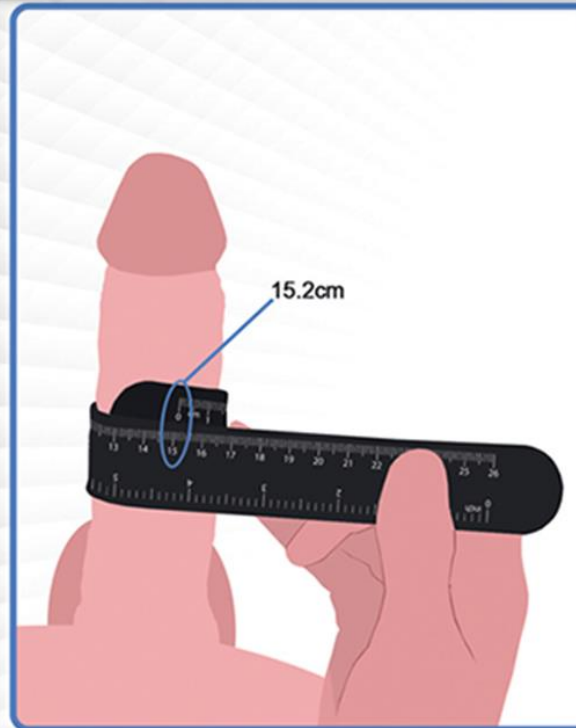

ШАГ 2. Выбор размера гидropомпы

= Согласно нашим измерениям
длина ПЧ 15 см, а обхват 15,2 см

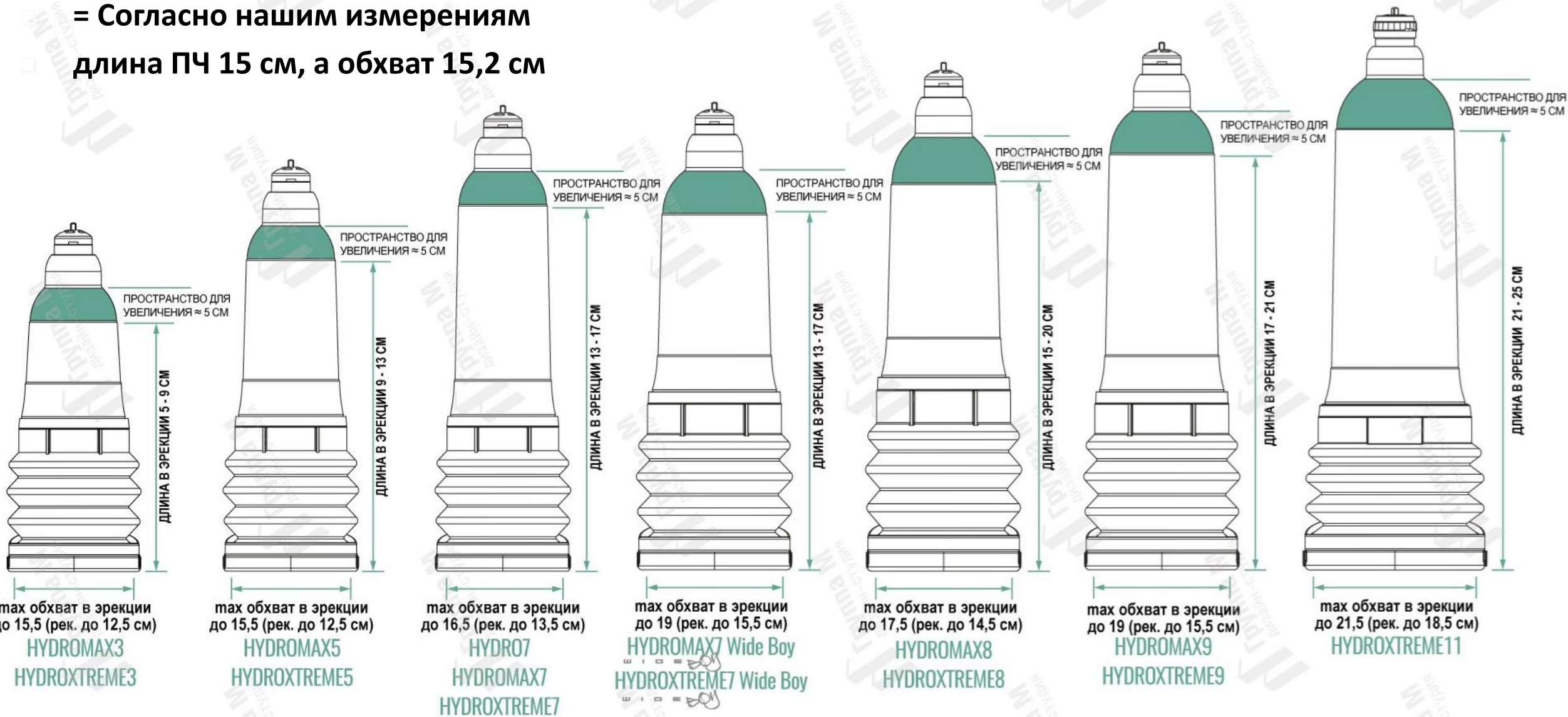

ШАГ 3. Выбор модели гидropомпы

- ▣ **ГИДРО 7:** базовая модель/ один размер/ привлекательная цена/ для начинающих
- ▣ -0,35 бар / длина ПЧ 13-17см / обхват ПЧ до 13,5 (max 16,5)
- ▣ **ГИДРОМАКС 3/5/7/7WB/9:** мощнее на 35% / удлинённая вставка/ фикс. обратного клапана
- ▣ -0,50 бар / длина ПЧ 5-9, 9-13, 13-17, 17-21 / обхват ПЧ 12,5-15,5 (max 19)
- ▣ **ЭКСТРИМ 3/5/7/7WB/9/11:** максимальная мощность/ доп. аксессуары/ покупка с запасом мощности
- ▣ -0,55 бар / длина ПЧ 5-9, 9-13, 13-17, 17-21, 21-25 / обхват ПЧ 12,5-18,5 (max 21,5)
- ▣ Гарантия на всю продукцию без электрических модулей 2 года



Новый размер

- Идеален для тех кто уже дотягивает до 17-18 см или слишком быстро перерастает модели 7-го размера, но ещё не готов переходить на модель 9-го размера

HYDROMAX8

для члена в эрекции от 15 до 17 см
рек. обхват до 14,5 см



ШАГ 4. Правильное использование

Bathmate STEP 01



Loosen up in a warm shower



Bathmate STEP 02



Fill pump with water



Press in pressure valve

Keep finger over valve whilst filling

Bathmate STEP 03



Place penis inside pump



Form a tight seal with pump and body


Bathmate STEP 04



Pump



Water is ejected from the valve

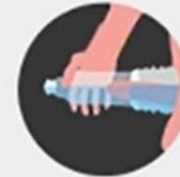

Push towards pubic bone

Penis is drawn up the tube

Pressure starts erection

BATHMATE HYDROMAX



Repump



Leave on for 15 mins

Bathmate STEP 05



Safely remove pump



Compress main valve to release pressure.

Bathmate STEP 06



Optional shower strap

Hand free shower strap

Easy use during shower



ШАГ 5. Режим тренировок

□ Интенсивный / +15-30% от начального размера

2 месяца, 5 дней в неделю, 3 подхода вакуумирования по 3-4 минуты
между подходами массаж члена 1 мин

+ джелкинг после тренировки с помпой

(100-150 вытягиваний с кремом для увеличения, на 50-70% эрекцию)

□ Поддерживающий/Профилактический (закрепление результата/здоровье)

1 год, 2-3 раза в неделю, 3 подхода вакуумирования по 3-4 минуты
между подходами массаж члена 1 мин

+ джелкинг после тренировки с помпой, если работаем на увеличение
(100-150 вытягиваний с кремом для увеличения)

ЗАНИМАТЬСЯ НЕ ДОЛЬШЕ 15 МИН/ДЕНЬ И ДЕЛАТЬ КАК МИНИМУМ 3 ПОДХОДА!

Если занимались дольше положенного времени, 2 недели перерыв и восстановление,
а затем заниматься с учётом рекомендаций

Условия успешного увеличения

- ▣ Оригинальная гидропомпа
- ▣ Правильный размер гидропомпы
- ▣ Выполнение джелкинга
- ▣ Заниматься не более 15 мин в сутки и делить это время как минимум на 3 подхода вакуумирования по 3-4 мин!

Факторы увеличения: физиология, начальный размер, режим тренировок, вредные привычки, возраст, состояние сосудов, эластичность тканей..



Current Erect Width
up to 1.8"

X20

Current Erect Width
up to 2.0"

X30

Current Erect Width
up to 2.2"

X40

Current Erect Width
up to 2.6"

X50

Current Erect Length:

9.1" - 11"

Противопоказания:

- ▣ Сердечно-сосудистые заболевания
- ▣ Заболевания легких
- ▣ Повышенное давление
- ▣ Венерические заболевания*



*полный список противопоказаний в инструкции к гидропомпе,
все противопоказания такие же как и для воздушных помп

Новый дизайн Power Rings

- ▣ Новые НЕ эластичные кольца MAXIMUS 45 и 55



Эластичные кокринги Power Rings

- ▣ Варвар (максимально эластичное)
- ▣ Спартанец (средняя эластичность)
- ▣ Гладиатор (самое тугое)
- ▣ Запатентованный материал:
Эластомекс (TPR+TPE)
- ▣ Брутально выглядят, но очень
приятные и мягкие на ощупь
- ▣ Совместимы со смазкой на водной и
силиконовой основе



Не эластичные кокринги Power Rings



- ▣ **Максимус 45** (обхват 14см)
- ▣ **Максимус 55** (обхват 17см)
- ▣ Материал: очень приятный соффтач медицинский силикон
- ▣ Брутально выглядят, украшают гениталии, на эрегированный член дают тот же эффект как и эластичные кольца
- ▣ Совместимы со смазкой только на водной основе
- ▣ Использовать не более 30 мин
- ▣ Гарантия 1 год

Вибропуля bathmate VIBE



- ▣ Очень мощная, способна стимулировать эрогенные зоны под водой на расстоянии до 1 см
- ▣ Перезаряжаемая (работает в течении 1,5 часов, заряжается в течении 2 часов)
- ▣ Водонепроницаемая (7IPX)
- ▣ 10 режимов вибрации
- ▣ USB – зарядка
- ▣ Материал: пластик
- ▣ Цвет: черный-матовый (софттач) или хром-глянцевый
- ▣ Длина 7,5см / Диаметр 2,2см
- ▣ Гарантия 1 год

Кольца Maximus Vibe 45 и Maximus Vibe 55



- ▣ Кокринг на базе вибропули bathmate VIBE
- ▣ Надевается за мошонку хорошо проводит вибрацию
- ▣ Диаметр 4,5 (14см) и 5,5 (17см)
- ▣ Водонепроницаемые (7IPX)
- ▣ USB – зарядка
- ▣ Материал: очень тактильный софттач медицинский силикон
- ▣ Совместим со смазкой только на водной основе
- ▣ Цвет: черный
- ▣ Гарантия 1 год

Стимулятор Edge Vibe



- ▣ Вибро массажёр на базе вибропули bathmate VIBE
- ▣ Гибкое подвижное кольцо трансформирует вибрацию в динамическую щекотку вокруг головки пениса
- ▣ Можно надеть кольцо на два пальца и поместив вибропулю в ладонь делать массаж
- ▣ На конце круглой части есть две выпуклости для передачи щекотки на соски, клитор или уздечку
- ▣ Водонепроницаемый (7IPX)
- ▣ USB – зарядка
- ▣ Материал: очень тактильный софтвач медицинский силикон
- ▣ Совместим со смазкой только на водной основе
- ▣ Цвет: черный
- ▣ Длина стимулятора 10см
- ▣ Диаметр отверстия 3,5см
- ▣ Гарантия 1 год

Стимулятор Hand Vibe



- ▣ Вибро массажёр на базе вибропули bathmate VIBE
- ▣ Динамичные и эластичные крылышки хорошо проводят вибрацию прилегают к стволу пениса
- ▣ Можно использовать как массажёр для любой части тела за счёт гнущихся крылышек
- ▣ Удобно помещается в руке, есть крепление
- ▣ Водонепроницаемый (7IPX)
- ▣ USB – зарядка
- ▣ Материал: очень тактильный софтвак медицинский силикон
- ▣ Совместим со смазкой только на водной основе
- ▣ Цвет: черный
- ▣ Длина стимулятора 10см
- ▣ Диаметр 3,5см туннеля
- ▣ Гарантия 1 год

Пробки Anal Training PIUGS и Anal Training PLUGS VIBE



- ▣ Разработаны на базе вибропули bathmate VIBE
- ▣ Два типа комплектации
- ▣ Тренажёр для начинающих (3 размера)
- ▣ Длина 7/8/9 см
- ▣ Диаметр 2,5/3/3,8 см
- ▣ Кольцо для удобного извлечения или для вибропули
- ▣ Водонепроницаемые (7IPX)
- ▣ 10 режимов вибрации
- ▣ USB – зарядка
- ▣ Материал: медицинский софтвач силикон, пластик
- ▣ Совместимы со смазкой только на водной основе
- ▣ Цвет: черный и хром
- ▣ Гарантия на вибропулю 1 год, на пробки 2 года

Стимулятор Prostate VIBE



- ▣ Разработан на базе вибропули bathmate VIBE игрушка 2 в 1 оптимальный размер для начинающих (с указательный палец)
- ▣ Перезаряжаемый (работает в течении 1,5 часов, заряжается в течении 2 часов)
- ▣ Водонепроницаемый (7IPX)
- ▣ 10 режимов вибрации
- ▣ USB – зарядка
- ▣ Материал: софттач пластик, медицинский силикон
- ▣ Совместим со смазкой только на водной основе
- ▣ Цвет: черный-матовый (софттач)
- ▣ Длина стимулятора 11см
- ▣ Диаметр толстой части 2,5см/тонкой 1,1см
- ▣ Гарантия 1 год

Стимулятор PROSTATE PRO



- ▣ 3 мощных мотора (2 в стимуляторе простаты и 1 в зоне промежности)
- ▣ Имеют режимы попеременного включения моторов что даёт очень необычный эффект круговой вибрации (режимы 5,6,7)
- ▣ 7 режимов вибрации + 3 скорости на каждую (с пульта ДУ)
- ▣ Режимы: 1-все моторы, 2-мотор простаты, 3-мотор ануса, 4-мотор промежности, 5-простата/анус/промежность (нарастающий), 6-простата/анус/промежность (плавное перетекание), 7-простата/анус/промежность (резкое переключение)
- ▣ Перезаряжаемый стимулятор с пультом ДУ
- ▣ Пульт ДУ на батарейке (CR2032)
- ▣ Стимулятор и пульт водонепроницаемые (7IPX)
- ▣ USB – зарядка
- ▣ Материал: очень тактильный софтвак медицинский силикон
- ▣ Совместим со смазкой только на водной основе
- ▣ Цвет: черный
- ▣ Длина стимулятора 13см
- ▣ Диаметр толстой части 3,2см/тонкой 1,4см
- ▣ Кейс для хранения
- ▣ Гарантия 1 год

Спринцовка Hydro ROCKET



- ▣ В носике встроен обратный клапан препятствующий всасыванию органических загрязнений из прямой кишки
- ▣ Материал: TPR, пластик
- ▣ Объём 325 мл
- ▣ Гарантия 2 года



Насадка на гидropомпу Hydro VIBE



- ▣ Насадка на базе 2 вибропуль bathmate VIBE
- ▣ Повышает эффективность тренировки за счёт гидромассажа и глубокой вибрации
- ▣ Подходит для всех моделей кроме 11
- ▣ Водонепроницаемая (7IPX)
- ▣ USB – зарядка
- ▣ Материал: очень тактильный софтвач медицинский силикон
- ▣ Цвет: черный
- ▣ Гарантия 1 год

Дополнительные аксессуары



- ▣ Ремешок для душа
- ▣ Гибкая линейка
- ▣ Сменные обратные клапаны для HYDRO7, HYDROMAX, XTREME
- ▣ Сменное уплотнительное кольцо для HYDRO7
- ▣ Кольцо уменьшитель диаметра помпы против засасывания мошонки для 5,7,9,11 (крайне редко применяется)
- ▣ Набора XTREME: сумка/полотенце/ершик/замочек ремешок/клинер (12ml)

Кольца bathmate Vibe Rings



- ▣ Эластомекс (TPR + TPE)
- ▣ Перезаряжаемая вибропуля (1 час работы)
- ▣ 4 формы:
 - TICKLE** (щекотка)
 - STRENGTH** (прочность)
 - EIGHT** (восмерка)
 - STRETCH** (растяжка)
- ▣ Прочные, мягкие, эластичные
- ▣ Совместимы с водной и силиконовой основой
- ▣ Гаранти 1 год